



Leikkurien hoito-ohjeet



Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet kaikille Hoitolatukussa myytävälle leikkureille (mm. Iloiset Varpaat, Credo ja Staleks).

HUOMIOITAVAA

- Noudata laitteen mukana toimitettuja valmistajan käyttöohjeita sekä desinfiointiaineen laimennus-, vaikutus ja muita ohjeita.
- Noudata erityistä huolellisuutta tarkastettaessa puhdistustulosta. Ruuvien, nivelien ja jousien kohdalla saattaa olla alueita, jonka puhdistustulosta on vaikea arvioida.
- Suorita silmämääräinen tarkastus ennen sterilointia. Käytä tarvittaessa apuvälineenä suurennuslasia.
- Varo pudottamasta leikkureita - leikkurien kärjet saattavat vaurioitua. Leikkureita, joiden kärki tai kärjet ovat vaurioituneet, ei voi enää teroittaa!
- Aseta leikkurit kylpyyn tai ultraäänipesuriin siten, että ne eivät kosketa toisiaan.
- Käsittele eri metalliseosta olevat leikkurit erikseen.

ERILAISET INSTRUMENTIT

Kynsileikkurit

Paksuja kynsiä leikattaessa vaaditaan enemmän voimaa. Kova metalli saattaa murtua helpommin, siksi kynsileikkureiden metalliseos on pehmeämpää kuin iholeikkureiden. Leikkurien eliniän pidentämiseksi niiden terä on hiottu kaarevaksi siten, että terien kärjet ottavat ensin kiinni. Voimakkaammin painaessa terien kärjet antavat periksi, jolloin koko terä leikkaa. Kun leikkurien terää katsotaan vasten valoa ja painetaan kevyesti terät toisiaan vasten, nähdään selvästi terän keskellä rako kärkien mennessä kiinni.

Iholeikkurit

Iholeikkureissa metalliseos on kovempaa, koska puristusvoimaa ei tarvita paljon. Kova metalli pysyy kauemmin terävänä. Terien kaarevuus on iholeikkureissa pienempi kuin kynsileikkureissa. HUOM! Iholeikkurit voivat murtua, jos niillä leikataan kynsiä.



Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy
Kalliorannantie 4
21310 Vahto

02 212 2200
info@hoitolatukku.fi
www.hoitolatukku.fi
huolto@hoitolatukku.fi

Jouset

Jousissa on usein ruuvien reiän kohdalla ura. Jousien palautusvoimaa voidaan säätää avaamalla ruuvia hiukan ja siirtämällä jousta joko eteenpäin (tuntuu napakammalta) tai taaksepäin (tuntuu löysemmältä). Ruuvit on voideltava tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Ultraäänipesuri

Käytä suu-, nenä- ja silmäsuojaimia sekä suojakäsineitä. Jos puhdistusta / desinfiointia ei voida suorittaa välittömästi käytön jälkeen, aseta ne kannelliseen astiaan tai pussiin odottamaan varsinaista toimenpidettä korkeintaan 1 tunnin ajaksi.

Käytettävät desinfiointiaineet:

Licoprop -desinfiointiaine soveltuu sekä pinnoille että instrumenteille. Sisältää isopropanolia, tensidejä sekä mineraaliöljyä. Ph 8,7, teho vastaa 70 % spriitä. Instrumenteille laimentamattomana, vaikutusaika 10 min.

Erisan Des -desinfiointiaine soveltuu sekä pinnoille että instrumenteille. Ph 10 (syövyttävä); laimennettava. Vaikutusaika 30 min. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.

1. Aseta leikkurit ultraäänipesuriin, valittuun liuokseen, noudattaen laitteen sekä liuoksen käyttöohjeita (Ultraäänipesurit: Unique Clean 0.5 tai 2.0)
Käytä tarvittaessa sterilointipussia.
2. Huuhtelevä desinfiointiaine juoksevan veden alla huolellisesti pois.
3. Kuivaa leikkurit paperipyyhkeellä ja anna kuivua hyvin (kosteus voi aiheuttaa ruosteen kaltaisia jälkiä teräspinnalla).

Steriloi:

- a. kuumailmassa; Kuumailmasterilaattori, aika 60 min, 170 °C
- b. höyryautoklaavissa; (Hydra 100 –autoklaavi); aika 5 min, 134 °C

Liotus

Aseta leikkurit desinfiointialtaaseen, noudata käytettävän aineen vaikutusaikaa. Huuhtelevä juoksevan veden alla huolellisesti ja harjaa tarvittaessa huuhtelun yhteydessä leikkureista karkea irtolika. Kuivaa paperipyyhkeellä ja anna kuivua hyvin. Käytä tarvittaessa sterilointipussia.

Steriloi:

- a. kuumailmassa; Kuumailmasterilaattori, aika 60 min. 170 °C
- b. höyryautoklaavissa; (Hydra 100 –autoklaavi); aika 5 min, 134 °C



LISÄTARVIKKEITA

a-care instrumenttiöljy 10 ml 559100

Instrumentti öljy (parafiiniöljy), joka on vaaraton, hajuton ja höyryä läpäisevä.

Kestää autoklaavissa 134 °C, sterilaattorissa 180 °C ja kuumuutta jopa 260 °C asti. Suojaa korroosiolta.

7 mm pitkä ja 0,8 mm halkaisijaltaan oleva neulamainen kärki mahdollistaa öljyn pääsyn ahtaille alueille.

Ei sisällä silikonia.

Instrumenttien puhdistusharja 559103

Instrumenttien pesuharja mekaaniseen välinehuoltoon. Ergonomisesti muotoiltu varsi, harjakset nylonia.

Varren pituus 18 cm. Harjasten pituus 13 mm. Harja voidaan steriloida autoklaavissa.

Desinfiointiallas 034002

Kätevä kannellinen allas instrumenttien liotukseen. Kun nostat kannen, niin kori nousee automaattisesti nesteestä ylös. Korin mitat: 23,5 x 9 x 3 cm. Ei dekoon.

Jouset varaosana 0741673

Voit vaihtaa itse leikkureiden jousia. Leikkureiden jouset sopivat kaikkiin muihin leikkureihin, paitsi yksipuolisiin leikkureihin, joissa käytetään vain yhtä jousta. Sisältää 1 parin.



Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy
Kalliorannantie 4
21310 Vahto

02 212 2200
info@hoitolatukku.fi
www.hoitolatukku.fi
huolto@hoitolatukku.fi