

HOITOLAN VÄLINEHUOLTO

Hoitolatukun selkeillä ohjeilla puhdistat, desinfioit ja steriloit instrumenttisi niin, että niitä on turvallista käyttää ja instrumenttisi säilyvät parhaassa kunnossa pitkään. Kun satsaat laadukkaisiin työkaluihin ja oikeisiin työtapoihin, säästät vuosien varrella pitkän pennin.

KONTAMINOITUNEET VÄLINEET

- Älä koskaan puhdista tai harjaa välineitä ennen desinfiointia
- Desinfioi heti käytön jälkeen instrumenttien desinfiointiin tarkoitettulla desinfiointiaineella
- Avaa leikkurit ja upota kokonaan desinfiointiaineeseen
- Laimennettavaa desinfiointiainetta käytettäessä laimenna aina kylmällä vedellä
- Noudata aina desinfiointiaineen käyttöohjeita

1. DESINFIOI

Desinfiointi voidaan tehdä kahdella eri tavalla, joko manuaalisesti desinfiointialtaassa tai ultraäänipesurilla.

Manuaalinen

- Liota desinfiointiaineen ohjeiden mukaisesti
- Huuhtelee juoksevan veden alla
- Tarvittaessa puhdista harjaamalla

Ultraäänipesuri

- Asettele välineet pesuriin väljästi
- Noudata desinfiointiaineen vaikutusaikaa
- Pese useita eriä, jos välineitä on paljon – pese poranterät erikseen
- Huuhtelee juoksevan veden alla

- Kuivaa välineet huolella – muista erityisesti leikkurien jousien pinnat
- Vältäaksesi välineiden ruostumista, anna niiden kuivua n. tunnin ennen sterilointia
- Huolla välineet ennen sterilointia käyttäen steriloinnin kestävää öljyä tai suihkutettavaa silikonaa

2. STERILOI

Autoklaavi

- Noudata laitteen valmistajan ohjeita

Kuumailmasterilaattori

- 170 astetta ja 60 minuuttia (Valvira)
- Älä ylitä lämpötilaa tai sterilointiaikaa, koska ylitys voi vaurioittaa välineitä
- Avaa leikkurit ennen sterilointia
- Asettele välineet väljästi
- Steriloi sekoitemateriaaleja sisältävät välineet erikseen, jotta ne eivät pilaa laadukkaita RST-instrumentteja
- Käytä välineet 48 tunnin sisällä steriloinnista ja säilytä ne puhtaassa, kuivassa, ilmatomassa säilytysrasiassa.
- Tarkasta välineiden puhtaus hyvässä valaistuksessa ja tarvittaessa puhdista uudestaan
- Vahingoittuneet ja kuluneet välineet siirretään pois käytöstä tai korjataan

Milloin väline kontaminoituu?

Kun se on kosketuksissa:

- ihoon ja kynsiin
- muihin välineisiin, jotka ovat olleet käytössä
- hanskoihin, joilla on hoidettu
- hoitoroiskeisiin tai -pölyyn

Lue lisää

Valviran ohjeista:

<https://valvira.fi/documents/152634019/171469384/Ohje+kauneushoitolan+ja+muun+vastaavan+tilan+sekä+ihoa+rikkovan+toiminnan+hygienian+ja+omavalvonnan+vaatimuksista+2024.pdf>



Näillä laitteilla homma hoituu

Ultraäänipuhdistin Unique Clean

Laadukas ultraäänipuhdistin ammattikäyttöön. Takuu 1 vuosi.

60960006 2,0 l Manuaalinen pesuajan säätö välillä 0-15 min

60960005 0,5 l Manuaalinen pesuajan säätö välillä 1-9 min



Ultraäänipuhdistin Unique Clean 2.0

079100 Hydra 100 -autoklaavi

Tukevarakenteinen, päältä avattava autoklaavi. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahvallinen kori steriloitavia instrumentteja varten. Helppokäyttöinen.

Lääketieteellinen laite 93/42 EEC. Käytönesteeksi ionipuhdistettu-/akkuvettä.

Sterilointiaika 15 minuuttia, Lämpötila 125 C. Takuu 1 v.



Ultraäänipuhdistin Unique Clean 0.5

073005 Tau Steril -kuumailmasterilaattori

Laitteen sisällä on kori, joka on nostettavissa mukana tulevilla nostokoukuilla.

Koriin mahtuu kerralla enintään 1/2 kg. Takuu 1 v.

Hoitolatukku suosittelee desinfiointiin

00105 Licoprop 3 l

Sopii poranterien, leikkureiden ja instrumenttien desinfiointiin.

Vaikutusaika instrumenteille 10 min. Käytetään laimentamattomana.



Autoklaavi Hydra 100

00708 Abbrill

Vaikutusaika 10 min, ehdoton ykkönen poranterille. Käytetään laimentamattomana.

Laatua myös lisätarvikkeissa

559100 a-care instrumenttiöljy

Medical-laatuinen parafiiniöljy, joka on vaaraton, hajuton ja höyryä läpäisevä.

Kestää autoklaavissa 134 C, sterilaattorissa 180 C ja kuumuutta jopa 260 C.



Licoprop

559103 Instrumenttien puhdistusharja

Autoklaavattavassa puhdistusharjassa on ergonomisesti muotoiltu varsi. Valmistusmaa Saksa.

Kun huollat instrumentteja ennen sterilointia, varmista, että öljy kestää kuumuutta. a-care öljy kestää. Älä myöskään ylitä lämpötiloja tai sterilointiaikoja.



Abbrill

Lisää laitteita, instrumentteja ja tuotteita puhdistukseen ja desinfiointiin löydät verkkokaupastamme www.hoitolatukku.fi



Instrumenttiöljy



Instrumenttiharja